

PŘÍBALOVÁ INFORMACE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

NÁZEV:

CANNEFF SUP - REKTÁLNÍ ČÍPKY

VÝROBCE:

CB21 Pharma, s.r.o.

Studentská 812/6, Bohunice

625 00 Brno

Složení:

CANNEFF SUP jsou čípky torpédovitého tvaru obsahující:

Sodná sůl kyseliny hyaluronové, cannabidiol, glycerol monostearát, tuhý tuk, voda čištěná.

Způsob balení:

CANNEFF SUP je dodáván ve formě individuálně balených čípků v kavitách spojených na platě po 3, 5 nebo 10 kusech. Balení obsahuje vždy jedno plato s 3, 5 nebo 10 kusy čípků po 2 g.

Popis a důvody pro použití:

Čípky CANNEFF SUP působí díky kyselině hyaluronové, která je v čípcích přítomna ve formě své soli - hyaluronanu sodném. Jako mukopolysacharid je hojně distribuována v mnoha tělesných tkáních, v nichž slouží jako strukturální podpora přinášející tkáňním napětí, výživu a pružnost.

Indikace:

CANNEFF SUP čípky se používají jako pomocná léčba při procesech hojení stavů anorektálního kanálu po proktologické operaci; vnitřní a vnější hemoroidy; proktitida; kryptitida; anální ragády; fisury; perianální píštěle.

Důvody pro nepoužívání:

- Důvodem pro nepoužívání čípků je individuální přecitlivělost na některou ze složek přípravku.
- Není vhodný pro děti do 12 let a mladistvé.

- Těhotenství a kojení:

Bezpečnost použití čípků CANNEFF SUP v průběhu těhotenství a kojení nebyla prokázána. Vzhledem k možné akumulaci cannabidiolu v mateřském mléku kojících matek, není pro ně tento přípravek doporučen.

- Vliv na schopnost řídit a obsluhovat zařízení nebo stroje:



Žádná zvláštní opatření nejsou nutná, CBD nemá psychotropní účinky. Přesto doporučujeme poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Interakce s jinými produkty:

Interakce s jinými produkty nejsou známy, proto je vhodné před použitím čípků současně s jinými zdravotnickými prostředky nebo léčivými kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Návod k použití:

V místě perforace oddělte z plata 1 čípek, obal mírným tahem roztrhněte a čípek z něj vyjměte. Zaobleným koncem napřed jej zaveďte do konečníku.

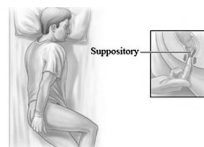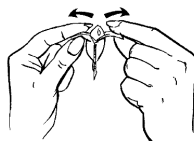

Z hygienického hlediska je doporučeno si umýt ruce před a po aplikaci zdravotnického prostředku.

Dávkování a doba užívání:

Použijte jeden čípek denně nejlépe večer nebo podle lékařského doporučení. Délka používání závisí na vývoji onemocnění a neměla by přesáhnout 30 dní.

Nežádoucí účinky:

Dlouhodobé používání všech místně aplikovaných produktů může vést k projevům přecitlivělosti. V těchto případech léčbu

přerušte a poradte se se svým lékařem za účelem zahájení vhodné léčby. Pokud se vyskytnou jiné nežádoucí účinky, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Varování:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti nebo pokud je vnitřní primární obal otevřen nebo poškozen.

Způsob uchovávání a doba použitelnosti:

Uchovávejte v původním obalu v rozmezí teplot od 2 °C do 25 °C, chraňte před přímým slunečním zářením. Doba použitelnosti 2 roky.

Verze a datum poslední revize:

PI/SUP/01_2021

27.01.2021

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK



Vysvětlivky k použitým značkám pro správné použití přípravku



Čtěte návod k použití



Omezení teploty – označuje meze teplot, kterým může být zdravotnický prostředek bezpečně vystaven



Chránit před slunečním zářením



Výrobce



Použit do data – označuje datum, po kterém se zdravotnický prostředek nemá používat



Kód dávky – označuje kód dávky výrobce pro možnost identifikace dávky nebo šarže



Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno